

# XN-450 — BOUTONS ET INTERRUPTEURS



Voyant lumineux d'état

Interrupteur de démarrage d'analyse

L'AVANT DU XN-450


Interrupteur d'alimentation de l'analyseur

Interrupteur d'ouverture/ de fermeture du porte-tube

Indicateur du volume restant de réactif

Informations sur l'échantillon

Bouton d'analyse manuelle

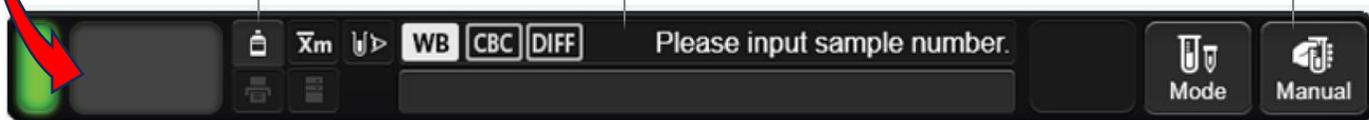

Zone de l'analyseur : Mode manuel

L'état de l'analyseur

Bouton mode d'analyse




Zone de l'analyseur : Mode manuel avec erreur

Message d'erreur

Bouton aide


### Passer un échantillon

1. Assurez-vous que l'analyseur est en état « Prêt ».
2. Assurez-vous que le mode WB est sélectionné.
3. Toucher [MANUEL].
4. Balayer le code à barres ou saisir manuellement l'ID de l'échantillon.
5. Si rien n'apparaît, Appuyer sur [SAISI].
6. Entrer le numéro de dossier du patient.
7. Vérifier l'identité du patient.
8. Toucher [OK].
9. Mélanger l'échantillon plusieurs fois par inversion.
10. Placer le tube dans le porte-tube BLANC.
11. Appuyer sur l'interrupteur de démarrage de l'analyse.
12. Une fois l'analyse terminée, retirer le tube.

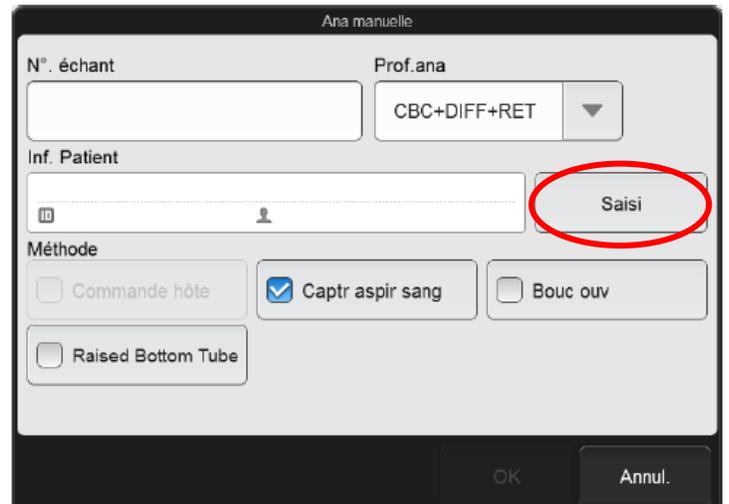

### Vérification des résultats d'analyse

1. À partir du menu principal, cliquer sur l'icône Explorer.
2. Sélectionner votre échantillon et double cliquer dessus pour visualiser les graphiques et les codes d'erreur s'il y a lieu.

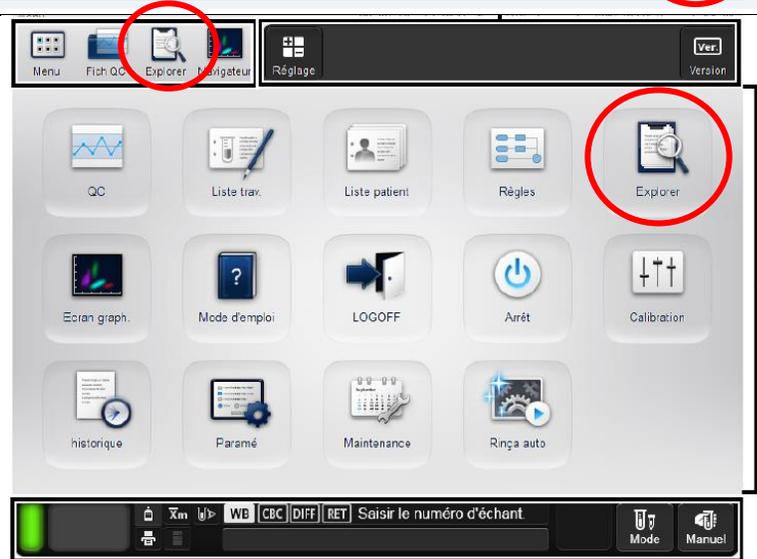

### Émission d'un rapport

1. Cliquer sur émission dans la barre du haut et sélectionner IMP. Graphique.

