

Procédure d'utilisation du Ca-500

Identifier vos cupules correctement :

CQ + vos initiales

de spécimen + vos initiales

Vous pouvez entrer les 4 derniers chiffres du # de spécimen ou le # au complet, c'est à votre choix.

1. Pour entrer l'identification de chaque cupule

- Peser sur : **Entrée ID**
- Choisir la touche QC si vous désirez programmer un contrôle

Les contrôles ont un nom bien à eux :

QC01 pour citrol 1

QC02 pour citrol 2

CQ03 pour citrol 3

Choisir les tests en touchant sur l'écran les tests désirés. Un rond vide apparaît vis-à-vis le numéro du test à côté de l'identification du patient.

Programmer les tests demandés pour chaque contrôle immédiatement après avoir entré le numéro du contrôle. Faire **ENTER** entre chaque contrôle.

Les patients ont leur numéro à eux : # de spécimen.

Vous pouvez entrer les 4 derniers chiffres du # de spécimen ou le # au complet, c'est à votre choix.

Programmer les tests demandés pour chaque patient immédiatement après avoir rentrer le numéro du patient Faire **ENTER** entre chaque patient.

2. Mettre les contrôles et les patients sur l'appareil en tirant le tiroir

3. Quand tout est terminé, appuyé sur : **Lancer ou Start selon l'appareil**

Vous aurez alors une question à répondre :

Première cupule ou continue ?

Si le support des cupules à est plein, répondre : **Première cupule**

Si le support des cupules à réactions n'est pas plein, répondre : **Continue**